

HINWEISE ZU INSTRUMENTEN **IN STANDARD-QUALITÄT (verchromt)**

Sehr geehrter Kunde,

sie haben Instrumente der Stations-Qualität – Import im Sinne des Artikel 1, Abs. 2b der Richtlinie 93/42/EWG erworben.

Diese Instrumente dürfen nicht für chirurgische Eingriffe verwendet werden. Es sind keine wiederverwendbaren, chirurgischen Instrumente gemäß Anhang IX, Artikel 1.3 der Richtlinie 93/42/EWG.

Diese Instrumente sind **nur für die Heißluft-und Gas-Sterilisation und nicht für die Dampf- oder Zentralsterilisation** geeignet.

Daher übernehmen wir für diese Produktgruppe lediglich eine Garantie der Gebrauchstüchtigkeit im Bezug auf die Funktionalität.

Bitte legen sie diese Instrumente **nicht** mit Instrumenten aus hochwertigem Edelstahl in den Sterilisator, da diese durch die Kontamination mit den evt. gelösten Stoffen der Stations-Instrumente beschädigt werden können.

Vor dem ersten Gebrauch sind die Instrumente gründlich mit Seife und Bürste zu reinigen um evtl. vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Riefelungen sauber gemacht werden.

Wenn sie die Instrumente mit Reinigungskonzentrat säubern, müssen diese unbedingt sofort mit **destilliertem oder entmineralisiertem Wasser abgespült und getrocknet** werden, da diese sonst korrodieren.

Bei der Trocknung ist dafür Sorge zu tragen, dass alle rauen Flächen, wie Zähne, Riefen, Durchsteckschlüsse, Sperren, und Schrauben besonders getrocknet werden, damit dort kein Wasser stehen bleiben kann.

Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre Nutzer weiter.

Hersteller

Christophorus CBC GmbH
Seestr. 66
69214 Heidelberg-Eppelheim

Tel. 06221/164401

Fax 06221/164411

e-mail: kontakt@cbcgmbh.de

Internet: www.cbcgmbh.de

Vertrieb

medida GmbH & Co.KG
Sangenweg 19
64589 Stockstadt

Tel. 06158/8785-0

Fax 06158/8785-190

e-mail: mail@medida.de

Internet: www.medida.de